


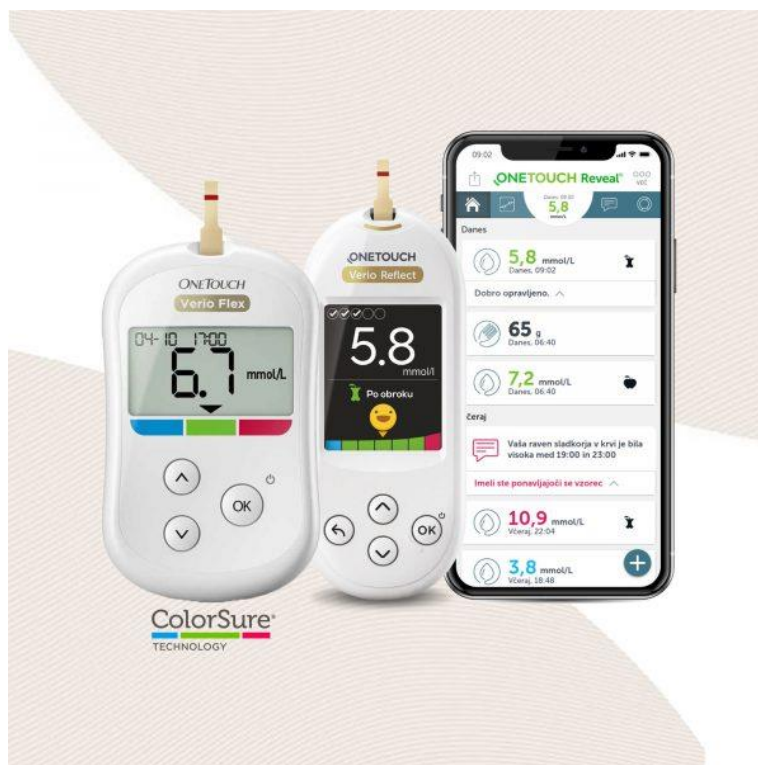

NAVODILA ZA PACIENTA ZA NASTAVITEV MOBILNE APLIKACIJE



Prenesite **BREZPLAČNO**
aplikacijo iz:



Korak 1: Prenesi aplikacijo OneTouch Reveal® (na voljo je na: www.onetouchreveal.si) ali jo «preberi» s pomočjo QR kode

Korak 2: Sledi korakom, ki ti jih ponudi aplikacija

Korak 3: Ustvari račun

Prvi korak do uporabe programa **OneTouch Reveal®** je registracija. Ob registraciji boste sami izbrali uporabniško ime ali vnesli vaš e-poštni naslov, geslo in z izbiro gumba »**Strinjam se**« potrdili **Soglasje za obdelavo osebnih podatkov**.

Korak 4: Prijava


Uporabniško ime ali e-poštni naslov

Geslo

Rezultate meritev ravni glukoze v krvi je mogoče iz merilnika brezžično poslati na pametno mobilno napravo (operacijski sistem IOS ali Android *). Za prenos podatkov morate imeti na mobilni napravi in na merilniku vključeno funkcijo »Bluetooth«. Rezultate iz merilnika lahko prenesete tudi na spletno aplikacijo oziroma se prenos meritev iz merilnika naredi na mobilno in spletno aplikacijo hkrati (preko Wi-Fi funkcije ali pa preko kabla).

- Naprošeni boste za dovoljenje za uporabo lokacijske storitve prek mobilne aplikacije OneTouch Reveal®. Dovoljenje je potrebno, če želite seznaniti ali sinhronizirati svojo mobilno napravo z napravo Bluetooth prek aplikacije.
- Če želite povezati katero koli napravo Bluetooth z aplikacijo v sistemu Android 6.0, morate omogočiti uporabo lokacijskih storitev. LifeScan predlaga uporabnikom, ki prejema ta poziv, da kliknejo možnost **Dovoli**. Poziv dejansko zahteva, da dovolite povezavo Bluetooth v aplikaciji.

Korak 5: Dodaj kliniko

V desnem zgornjem kotu ekrana se nahaja meni oz.  (more - v IOS sistemu). Izberite polje **Povezave (Connections)**. Tu se lahko povežete z vašo diabetološko ambulanto. Informacije o svojem zdravstvenem stanju lahko delite s članom zdravstvenega tima.

Z klikom na:



Vpišite kodo klinike

Dobite jo pri svojem zdravniku in se pozanimajte, ali sodelujete v našem programu.

Ostala navodila za uporabo programa **OneTouch Reveal®** boste našli v meniju **Pomoč**.

V primeru težav ali morebitnih dodatnih vprašanj pokličite na našo brezplačno telefonsko številko **080 14 41** ali nam pišite stik.si@onetouch.com